



TITADSU

Soluciones de seguridad y calidad
basadas en riesgos



SS-CER300230
CO-SS-004-1



CO-SC6834-1
CO-SC-CER95946



Registro Aduanero del Estado Colombiano
COLBOG00470-1-9
ECUIIO00147-1-8
PERLIM00435-1-9

ALCOHOLÍMETRO PRESTIGUE

INSTRUCTIVO DE USO DEL ALCOHOLÍMETRO PRESTIGUE

- PASO 1
- PASO 2
- PASO 3
- PASO 4



- 1 Oprimir el botón "Power" para encender
- 2 Colocar en la boquilla un soberte, mientras se espera que termine el conteo
- 3 Usar cuando termine el conteo regresivo y quede en 0.00
- 4 Verificar en el indicador la correcta toma de muestra de aliento % BAC

RECOMENDACIONES

Se recomienda tomar una foto durante la toma de la muestra y otra sobre el resultado

CARACTERÍSTICAS DEL ALCOHOLÍMETRO PRESTIGUE

1. Fácil manejo y lectura
2. Precisión de lectura superior al 99%
3. Indicador LED %BAC
4. Rango de medición: 0.00 - 0.40%BAC
5. Tiempo de respuesta: 5 segundos
6. Alta durabilidad
7. Sensor tipo semiconductor intercambiable calibrado desde fábrica
8. No requiere calibración



9. Equipo portátil, utiliza fuente de energía económica (Pilas AAA alcalinas)
10. Aprobado por:
 - DOT (U.S. Department of Transportation)
 - FDA (U.S. Food and Drug Administration)
 - NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration)
11. Fabricado bajo estándares de calidad ISO 9001

TITADSU S.A.C.

Av. Elmer Faucett 2823 Of.211
Centro Aéreo Lima Cargo City.
Tel/fax. (51-1) 628-2861 / 62
gerencia_peru@titadsu.com
Lima - Perú

TITADSU S.A.

Kennedy Norte, M. H. Alcivar y
N. Isaias, Torres del Norte, PB oficina 4.
Tel/fax. (593-4) 268-7420 / 268-7072
gerencia_ecuador@titadsu.com
Guayaquil - Ecuador

TITADSU S.A.S.

Avenida Calle 80 N° 69 - 70
Unidad 19.
Tel PBX (57-1) 704-4545
gerencia_colombia@titadsu.com
Bogotá - Colombia

